

# APESIN swift



## Desinfectiemiddel op alcohol basis

- Gebruiksklaar
- Werkzaam tegen gisten en bacteriën
- PT 2, PT 4

### Productprofiel

- APESIN swift is een gebruiksklaar desinfectiemiddel om kleine oppervlakken (0,5 m<sup>2</sup>) te desinfecteren.
- APESIN swift is toegelaten in Nederland onder n° 15790N.
- APESIN swift heeft een afdodende werking voor bacteriën en gisten.

### Toepassingsgebied

- Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op:
- PT 2: Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, oppervlakken (incl. gebruiksvoorwerpen) voor de cosmetische en (para)medische behandeling van mensen en oppervlakken (incl. gebruiksvoorwerpen) voor de cosmetische veterinaire behandeling van dieren.
- PT 4: Oppervlakken (incl. apparaten en materialen) welke in contact komen met eet- en drinkwaren (incl. diervoeders) en de grondstoffen hiervoor echter met uitzondering van melkwinningapparatuur op de boerderij.

### Gebruiksaanwijzing

- Product aanbrengen (10 ml / 0,5 m<sup>2</sup>). Respecteer de inwerktijd. Zie pagina 2 van deze technische fiche. Zorg dat de oppervlakken vochtig blijven.
- Niet werkzaam tegen sporen en mycobacteriën.
- Controleer de materiaalcompatibiliteit op een weinig zichtbare plek.

### Ingrediëntenlijst:

Ingrediënten per 100 g: 76 g Alcohol

### Duurzame ontwikkeling en productie:



### Productveiligheid, opslag en milieuvorschriften

**Veiligheid:** Enkel voor professioneel gebruik. Voor bijkomende informatie raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

**Opslag:** Opslaan bij kamertemperatuur in de originele verpakking. Verwijderd houden van warmte, warme oppervlakken, vonken, open vuur en ontstekingsbronnen. Niet roken.

**Milieu:** Enkel volledig lege verpakkingen in de afvalcontainer gooien.

### Gebruik en dosering



**Gezondheidszorg:**  
Product aanbrengen op het oppervlak. Inwerktijd respecteren. Verwijder met papier of schoon doekje.



Reinig en spoel de oppervlakken. Product aanbrengen. Laten inwerken.



Reinig en spoel de oppervlakken. Product aanbrengen. Laten inwerken.



Product aanbrengen op het oppervlak. Inwerktijd respecteren. Wegnemen met papier of schoon doekje.



Product moet minstens 2 minuten op het oppervlak blijven.

#### Verpakking

Artikelnr.: 714962      20 x 500 ml

#### Uw vertrouwde partner

pH-waarde



# APESIN swift

## Desinfectie activiteit van APESIN swift

Activiteit	Omstandigheden	Contacttijd	
		30 sec.	5 min.
<b>Bactericide</b>			
EN 1500	–	x	
EN 13727	Schoon		x
EN 13697	Schoon		x
<b>Levuricide (gisten)</b>			
EN 13624	Schoon		x
EN 13697	Schoon		x
<b>Fungicide</b>			
EN 13624	Schoon		x
EN 13697	Schoon		x
<b>Virucide</b>			
EN 14476 – Poliovirus type 1	Schoon		x
EN 14476 – Adenovirus type 5	Schoon		x
EN 14476 – Norovirus	Schoon		x
EN 14476 – Rotavirus	Schoon		x

Dit product is in België en Groot Hertogdom Luxemburg ook toegestaan als fungicide en virucide.