

Suma[®] Alcoholdoekjes

Gebruiksklare vochtige alcoholdoekjes

Productomschrijving

Suma Alcoholdoekjes zijn gebruiksklare vochtige doekjes geïmpregneerd met een desinfecterende oplossing.

De doekjes bevatten 77% ethanol en kunnen worden gebruikt als aanvulling op bestaande procedures voor reiniging en desinfectie. Voor effectieve reiniging van kleine voorwerpen en oppervlakken die onder werkomstandigheden vaak en snel een hygiënisch resultaat vereisen zoals thermometervoelers, handgrepen, deurklinken, toiletkranen, bedieningspanelen, tiptoetsen, pincetten en tangen.

Belangrijke eigenschappen

1 Pot bevat 160 cellulosedoekjes van 13 x 13 cm geïmpregneerd met 77% ethanol. De pot met vochtige doekjes is extra afgesloten met plastic folie om verdamping van de alcohol zoveel mogelijk tegen te gaan. Hierdoor zijn de doekjes langdurig te gebruiken op kleine oppervlakken en voorwerpen.

Voordelen

- Suma Alcoholdoekjes van Diversey Care bevatten 77% ethanol en kunnen worden gebruikt als aanvulling op bestaande procedures voor reiniging en desinfectie
- Het risico van tussentijdse ontwikkeling en overdracht van bacteriën wordt hiermee verder beperkt
- De doekjes laten na gebruik geen residu achter en kunnen derhalve zonder risico gebruikt worden op voedselcontactplaatsen

Wettelijk gebruiksvoorschrift


Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en virussen:

1. op oppervlakken welke in contact komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor;
2. op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
3. op oppervlakken en instrumenten in de gezondheidszorg;
4. op oppervlakken in de cosmetische en farmaceutische industrie.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing

- deksel afnemen
- verwijder de folie
- alcoholdoekje uitnemen en door steropening in dop aanbrengen
- eerste doekje uittrekken en afscheuren
- na gebruik deksel goed afsluiten om uitdroging van de doekjes te voorkomen

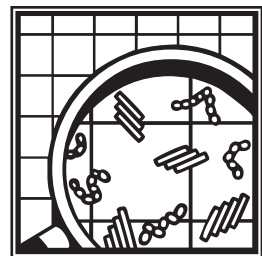

Suma[®] Alcoholdoekjes

Gebruiksklare vochtige alcoholdoekjes

Toepassing

Oppervlakken of instrumenten eerst goed reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.

Daarna het te desinfecteren oppervlak met een Suma Alcoholdoekje afnemen. Zorg ervoor dat het gehele te desinfecteren oppervlak gedurende de inwerktijd volledig bevochtigd blijft.

Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.

Dosering

1 doekje bevat 1 ml desinfectie vloeistof en is geschikt voor maximaal 0,125 m² oppervlak. Zoveel Suma Alcoholdoekjes gebruiken dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

Minimale inwerktijd: 1 minuut.

Technische gegevens

Vorm	Vloeistof op inert dragermateriaal
Vlampunt	12°C
Dichtheid [20°C]	0,8 g/cm ³ .

Veilige hantering en opslag

In goed gesloten, originele verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats en koel bewaren. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.

Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product staat vermeld in een separaat geleverd veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

Registratie

Dit product is in Nederland officieel als desinfectiemiddel geregistreerd onder toelatingsnummer 14025 N.

Verkrijgbare verpakkingen

Artikelnummer	Productnaam	Verpakkingsgrootte
7522683	Suma Alcoholdoekjes	Doos met 6 potten á 160 doekjes
A107037	RVS ophangbeugel	Doos met 1 roestvaststalen ophangbeugel voor pot Suma Alcoholdoekjes (incl. pluggen en RVS schroeven)

Diversey BV

Tel.: +31 (0)30 247 69 11

www.sealedair.com